


MASKEN KNIGGE

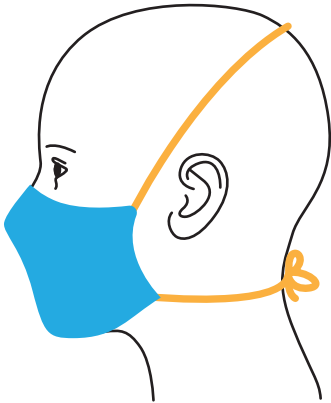


45°

45° ist die beste Tragevariante für Personen, die Druckprobleme am Kopf verspüren.

Sie lässt sich leicht durch die nur unten offene Elastikkordel mit einer Schleife fixieren und durch die seitliche Raffung perfekt an jede Kopfform anpassen.

Anwendungen: Business Meetings, Einzelhandel, Versammlungen, Sport, Shopping und vieles mehr.

Empfohlen für Tragezeiten von 1 bis 8 Stunden.

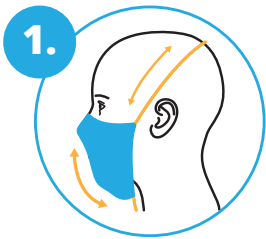

1.

Mund-Nasen-Maske aus der Safer Box nehmen. Obere Kordelschleife im 45° Winkel auf den Hinterkopf. Mund-Nasen-Maske über die Nase und den Mund ziehen, locker hängen lassen.




2.

Den integrierten Nasen-Wangen-Bügel sauber an Nase und Wangenpartie anpassen.



3.

Die Mund-Nasen-Maske unter das Kinn ziehen, den Stoff seitlich etwas anpassen.

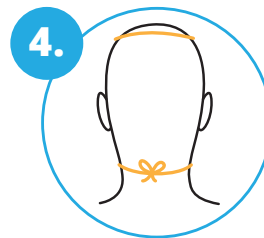

4.

Die beiden Kordelenden hinter dem Hals mit einer Schleife verbinden.



5.

Beide Seiten der Mund-Nasen-Maske durch Raffung nach oben oder unten an die Gesichtsförm anpassen.



6.

Je nach Wunsch und Gefühl, kann die Mund-Nasen-Maske nun noch einmal etwas leichter oder fester gebunden werden.

Nehmen Sie sich Zeit vor dem Spiegel beim ersten Binden!

**look good!
feel good!**