


MASKEN KNIGGE

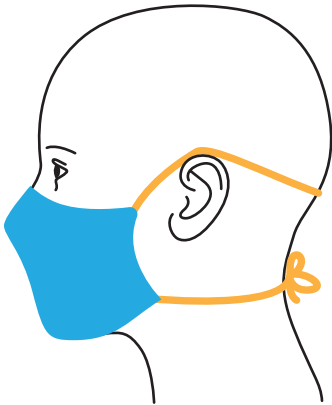


CLASSIC

CLASSIC ist die klassische Tragevariante unserer Mund-Nasen-Maske.

Sie lässt sich leicht durch die nur unten offene Elastikkordel mit einer Schleife fixieren und durch die seitliche Raffung perfekt an jede Kopfform anpassen.

Anwendungen: Business Meetings, Einzelhandel, Versammlungen, Sport, Shopping und vieles mehr.

Empfohlen für Tragezeiten von 1 bis 8 Stunden.

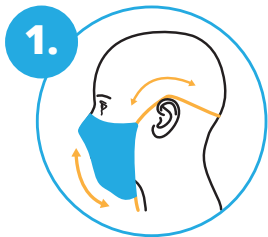


1.

Mund-Nasen-Maske aus der Safer Box nehmen. Obere Kordelschleife auf den Hinterkopf. Mund-Nasen-Maske über die Nase und den Mund ziehen, locker hängen lassen.




2.

Den integrierten Nasen-Wangen-Bügel sauber an Nase und Wangenpartie anpassen.

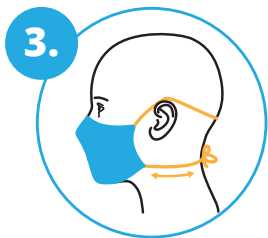


3.

Die Mund-Nasen-Maske unter das Kinn ziehen, den Stoff seitlich etwas anpassen.

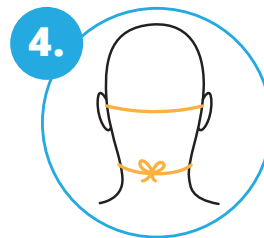

4.

Die beiden Kordelenden hinter dem Hals mit einer Schleife verbinden.

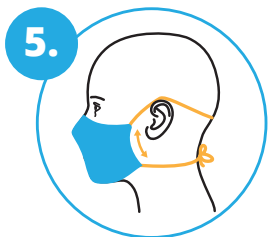

5.

Beide Seiten der Mund-Nasen-Maske durch Raffung nach oben oder unten an die Gesichtsform anpassen.



6.

Je nach Wunsch und Gefühl, kann die Mund-Nasen-Maske nun noch einmal etwas leichter oder fester gebunden werden.

Nehmen Sie sich Zeit vor dem Spiegel beim ersten Binden!

**look good!
feel good!**